

# IVISION DRY

## GOTAS OCULARES



20 unidosis de 0,5 mL  
con autocierre

Doble acción hidratante y lubricante:  
Hipromelosa y Hialuronato sódico

SIN CONSERVANTES  
SIN FOSFATOS  
COMPATIBLE CON LENTES DE CONTACTO

**IVISION DRY GOTAS OCULARES** es una solución oftalmológica estéril, hidratante y lubricante con pH fisiológico y con dos lubricantes: hipromelosa y hialuronato sódico.

La hipromelosa es un polímero viscoso con propiedades humectantes y mucomiméticas que estabilizan la película lacrimal de la superficie de los ojos creando una capa protectora, transparente y viscoelástica.

Gracias a sus propiedades, la hipromelosa protege y lubrica la superficie ocular reduciendo la sensación de molestia y proporcionando un alivio a los ojos irritados al restablecer la lágrima natural.

El hialuronato sódico es un polímero viscoso con propiedades mucomiméticas que puede garantizar una adecuada lubricación de la superficie ocular. Además, el hialuronato sódico retiene agua manteniendo de este modo hidratada la superficie ocular, protegiéndola de la fricción causada por el movimiento ocular y los agentes medioambientales.

Gracias a la doble acción de la hipromelosa y del hialuronato sódico que atraen y retienen el agua del entorno, **IVISION DRY GOTAS OCULARES** forma una capa viscosa lubricante en la superficie del ojo que libera agua progresivamente proporcionando una hidratación duradera en los ojos.

**IVISION DRY GOTAS OCULARES** actúa como hidratante y lubricante proporcionando un alivio en condiciones de sequedad ocular, incluidas aquellas asociadas al uso del ordenador, a un parpadeo irregular, a determinados tratamientos médicos, a la contaminación atmosférica, al aire acondicionado, al viento y/o al sol.

**IVISION DRY GOTAS OCULARES** también garantiza un alivio del estrés oftalmológico por el uso de lentes o tras una intervención quirúrgica en la superficie ocular (tales como PRK, LASIK, LASEK).

**IVISION DRY GOTAS OCULARES** no contiene conservantes ni fosfatos. La ausencia de conservantes permite su uso con lentes de contacto.

### INSTRUCCIONES DE USO

Separar la dosis única de la tira y abrirla girando el tapón de cierre.

Administrar 2/3 gotas en cada ojo presionando suavemente el envase unidosis.

Cerrar la unidosis inmediatamente tras su uso: el producto deberá utilizarse en un plazo no superior a las 12 horas tras su apertura inicial. Se puede utilizar con la frecuencia que sea necesaria en función de la gravedad de los síntomas siguiendo las instrucciones del médico. Tras parpadear la solución se distribuirá y formará una capa transparente viscosa en la superficie ocular.

Tras la aplicación del producto la visión se puede empañar temporalmente. Si este efecto persiste o empeora consultar con el médico.

Compatible con lentes de contacto.

### COMPOSICIÓN

Hialuronato sódico 0,2 %, hipromelosa 0,2 %, ácido bórico, tetraborato de sodio decahidratado, cloruro de sodio, agua para inyectables. Sin conservantes ni fosfatos.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Indicado para uso oftálmico.

No utilizar en ningún caso si se daña el recipiente al abrirlo o si éste no se encontraba totalmente sellado.

Durante su aplicación, no tocar los ojos ni cualquier otra superficie con el envase unidosis.

No utilizar en caso de incompatibilidad conocida con alguno de los componentes.

Interrumpir el tratamiento si surge algún problema y consultar al médico.

No utilizar una vez transcurrida la fecha de caducidad que aparece en el envase y en la etiqueta.

Tras su uso, colocar en el contenedor de reciclaje correspondiente.

Mantener fuera del alcance de los niños.

### ENVASE

20 dosis únicas de 0,5 mL con autocierre.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

No almacenar por encima de los 25°C.

El producto deberá utilizarse en un plazo no superior a 12 horas tras la apertura inicial.



**Nutra Essential OTC**

C/ La Granja, 1  
Alcobendas, 28108  
[Madrid] ESPAÑA

Distribuido por:

**Farmamix Visión**

C/ Amposta, 20  
Sant Cugat de Vallés, 08174  
[Barcelona] ESPAÑA

 **Farmamix**  
VISION

 **0546**

Última Revisión 10/2018

**STERILE A**