

IVISION DRY

GOTAS OCULARES



10 mL multidosis

Doble acción hidratante y lubricante:
Hipromelosa y Hialuronato sódico

SIN CONSERVANTES
SIN FOSFATOS
COMPATIBLE CON LENTES DE CONTACTO

IVISION DRY GOTAS OCULARES es una solución oftalmológica estéril, hidratante y lubricante con pH fisiológico y con dos lubricantes: hipromelosa y hialuronato sódico.

La hipromelosa es un polímero viscoso con propiedades humectantes y mucomiméticas que estabilizan la película lacrimonal de la superficie de los ojos creando una capa protectora, transparente y viscoelástica. Gracias a sus propiedades, la hipromelosa protege y lubrica la superficie ocular reduciendo la sensación de molestia y proporcionando un alivio a los ojos irritados al restablecer la lágrima natural.

El hialuronato sódico es un polímero viscoso con propiedades mucomiméticas que puede garantizar una adecuada lubricación de la superficie ocular. Además, el hialuronato sódico retiene agua manteniendo de este modo hidratada la superficie ocular, protegiéndola de la fricción causada por el movimiento ocular y los agentes medioambientales.

Gracias a la doble acción de la hipromelosa y del hialuronato sódico que atraen y retienen el agua del entorno, **IVISION DRY GOTAS OCULARES** forma una capa viscosa lubricante en la superficie del ojo que libera agua progresivamente proporcionando una hidratación duradera en los ojos.

IVISION DRY GOTAS OCULARES actúa como hidratante y lubricante proporcionando un alivio en condiciones de sequedad ocular, incluidas aquellas asociadas al uso del ordenador, a un parpadeo irregular, a determinados tratamientos médicos, a la contaminación atmosférica, al aire acondicionado, al viento y/o al sol.

IVISION DRY GOTAS OCULARES también garantiza un alivio del estrés oftalmológico por el uso de lentes o tras una intervención quirúrgica en la superficie ocular (tales como PRK, LASIK, LASEK). Gracias al sistema de cierre USA (dispensador oftálmico flexible) **IVISION DRY GOTAS OCULARES** no necesita conservantes ni fosfatos. La ausencia de conservantes permite su uso con lentes de contacto.

INSTRUCCIONES DE USO

Retirar el precinto de seguridad antes de la primera administración.

Retirar el tapón protector y abrir el frasco.

Administrar 1/2 gotas en cada ojo presionando ligeramente el frasco.

El vaciado gradual del frasco puede dar lugar a la necesidad de ejercer más presión para permitir la salida del producto. Esto se debe a las propiedades del sistema de cierre que actúa para preservar la esterilidad y las características químicas y físicas de las soluciones sin conservantes ni fosfatos.

Cerrar el frasco inmediatamente tras su uso: el contenido podrá volver a utilizarse hasta 3 meses tras la apertura inicial.

Se puede utilizar con la frecuencia que sea necesaria en función de la gravedad de los síntomas siguiendo las indicaciones del médico.

Tras parpadear la solución se distribuirá y formará una capa transparente viscosa en la superficie ocular.

Tras la aplicación del producto la visión puede resultar temporalmente borrosa. Si este efecto persiste o empeora consultar con el médico. Compatible con lentes de contacto.

COMPOSICIÓN

Hialuronato sódico 0,2 %, hipromelosa 0,2 %, ácido bórico, tetraborato de sodio decahidratado, cloruro de sodio, agua para inyectables. Sin conservantes ni fosfatos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Indicado para uso oftálmico.

No utilizar en ningún caso si se daña el recipiente al abrirlo o si este no se encontraba totalmente sellado.

Durante su aplicación, no tocar los ojos ni cualquier otra superficie con el frasco multidosis.

No utilizar en caso de incompatibilidad conocida a alguno de los componentes.

Interrumpir el tratamiento si surge algún problema y consultar al médico.

No utilizar una vez transcurrida la fecha de caducidad que aparece en el envase y en la etiqueta.

Tras su uso, colocar en el contenedor de reciclaje correspondiente.

Mantener fuera del alcance de los niños.

ENVASE

Frasco multidosis de 10 mL, sin conservantes.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

No almacenar por encima de los 25°C.

Tras su apertura inicial se deberá utilizar el producto en un plazo de 3 meses.

VALIDEZ

Con el envase cerrado: no exceder la fecha de caducidad indicada en el envase y en el frasco multidosis.



Nutra Essential OTC
C/ La Granja, 1
Alcobendas, 28108
(Madrid) ESPAÑA

Distribuido por:

Farmamix Vision
C/ Amposta, 20
Sant Cugat de Vallés, 08174
(Barcelona) ESPAÑA



Farmamix
VISION

CE 0546

Última Revisión 07/2016

STERILE A